



Ortho
GROUP

www.orthogroup.pl tel. (22) 406 17 80

The Next
Generation
In Self-Ligation




TenBrook
self-ligating system™




orthoclassic

Uwaga: Do uszkodzenia mechanizmu zatraskowego zamka T1 dochodzi przeważnie podczas próby otwierania go w niewłaściwym kierunku (nie jest tu potrzebne działanie dużej siły) lub przy nieprawidłowym zamykaniu go (użycie innych narzędzi niż rekomendowane). Konieczne jest zamknięcie zamków przed wysłaniem Pacjenta na szczotkowanie podczas wizyty kontrolnej.

MAXILLARY RIGHT – OTWIERANE MEZJALNIE

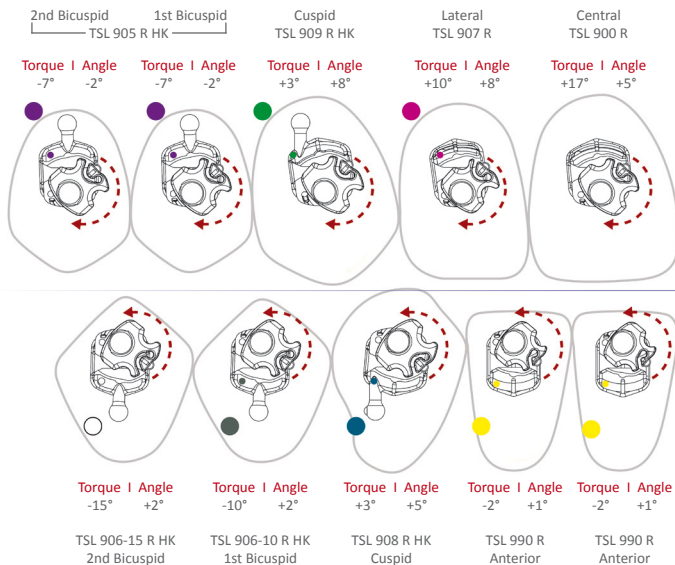

OTWIERANE MEZJALNIE – MAXILLARY LEFT

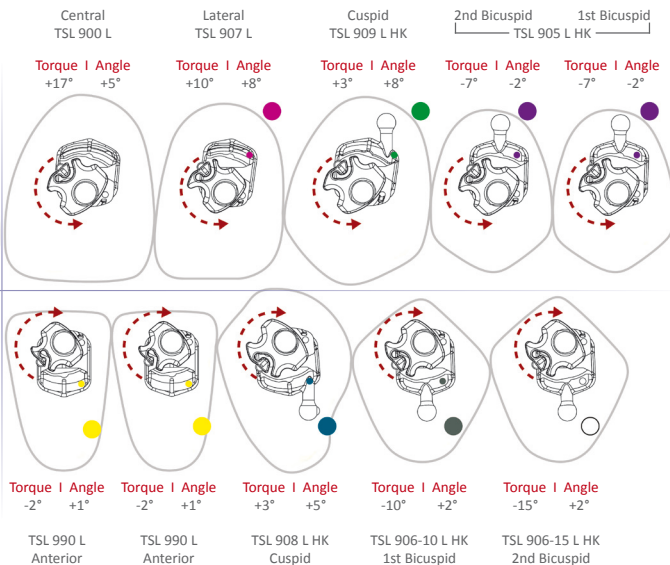

MANDIBULAR RIGHT – OTWIERANE MEZJALNIE



Podczas pozycjonowania narzędzia na zamku linie wycięte na obu końcach powinny być skierowane do dziąsła.

OTWIERANE MEZJALNIE – MANDIBULAR LEFT



Aby otworzyć mechanizm zatraskowy zamka należy umieścić narzędzie w miejscu pokazanym na rysunku i pociągnąć w kierunku mezialnym.